

FICHE TECHNIQUE

GIONEB RAPIDO

Code Interne

D020201

Dispositif Médical de Classe IIb
Directive 93/42/CEE – Marquage CE

Révision n°

05

Date

05-04-2017



**NETTOYANT DÉSINFECTANT PRÊT À L'EMPLOI
HYDROALCOOLIQUE AVEC UN LARGE SPECTRE
D'ACTION.**

- Désinfection virucide, bactéricide, fongicide et tuberculicide, rapide et persistante au fil du temps de toutes les surfaces hautes et points de contact, interrupteurs, etc.....
- Conforme aux Normes EN : 13624, 13727, 14348, 14476
- Prêt à l'emploi
- Ne nécessite pas de rinçage car c'est un produit à évaporation rapide.
- Ne laisse pas de trace
- Pouvoir nettoyant élevé, qui facilite le détachement des particules organiques

100 g de solution contiennent:

	Ingrédient	g
Principes actifs	Chlorure de benzalkonium	0,040
	Chlorure de didécyltriméthylammonium	0,060
	Digluconate de chlorhexidine	0,050
	Alcool isopropylique	31,000
	Alcool éthylique	31,500
Excipients	Coformulants, dénaturants et eau purifiée q.s. à	100,000

MODE D'EMPLOI

- Le produit est prêt à l'emploi et ne nécessite donc aucune dilution.
- Le produit doit être utilisé par du personnel spécialisé, avec des règles de sécurité appropriées.
- Pour son utilisation comme désinfectant, nous recommandons:
 - Disperser (nébuliser) abondamment et de manière diffuse (parfois à l'aide d'un chiffon jetable) sur les surfaces et les objets,
 - Laisser agir au moins 5 minutes selon la propreté de la surface (activité virucide, bactéricide, fongicide et tuberculicide),
 - Essuyer si nécessaire,
- Ne pas rincer à l'eau pour maintenir un effet résiduel sur les surfaces

DILUTION

Prêt à l'emploi

DONNEES TECHNIQUES

ASPECT : Liquide clair

COULEUR : Incolore

PARFUM : Typique de l'alcool

PH : 6,0 - 8,0

DENSITE (g/ml) : 0,88

PRECAUTION

Il est recommandé de l'appliquer uniquement sur des matériaux compatibles avec l'alcool. Le produit doit être utilisé par du personnel spécialisé, avec des règles de sécurité appropriées. Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Porter un équipement de protection des yeux. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. En cas d'incendie : utiliser un extincteur à poudre pour l'extinction. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.



NOTES

Toujours consulter la fiche technique et la fiche de sécurité du produit avant l'utilisation. Utiliser les EPI indiqués dans la fiche de données de sécurité.

GIOCHEMICA décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages occasionnés par une utilisation inappropriée du produit. Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Conditionnement

Code produit	Format
D02020106	Spray 1 litre

Tests d'activité biocide réalisés sur la solution GIONEB RAPIDO en l'état

Activité	Souches de test	Norme	Conditions	Heure du contact
Bactéricide	E. hirae ATCC 10541 P. aeruginosa ATCC 15442 S. aureus ATCC 6538	EN 13727 (Phase 2, Étape 1)	Propre et Sale	30 secondes
Fongicide (Levure)	C. albicans ATCC 10231	EN 13624 (Phase 2, Étape 1)	Propre et Sale	30 secondes
Mycobactéricide	Mycobacterium terrae ATCC 15755 Mycobacterium avium ATCC 15769	EN 14348 (Phase 2, Étape 1)	Propre et Sale	5 minutes
Virucide	HIV, HBV, HCV	EN 14476 (Phase 2, Étape 1)	Propre et Sale	30 secondes 5 minutes